

## Инструкция по сборке и эксплуатации

### Сервисная тележка металлическая М138-02 (вид 202390)

Изделие изготовлено в соответствии с  
ТУ 9452-001-16789225-2016

Рег.удостоверение № РЗН 2017/5521 от 22.03.2017

#### Общие указания

Тележка сервисная разборная предназначена для перевозки и сбора постельного и др. белья внутри помещений гостиниц, санаториев, домов отдыха, оздоровительных центров, предприятий сферы обслуживания, стационарных лечебных учреждений.

Функциональные размеры данного изделия позволяют обслуживающему персоналу свободно перемещать тележку по коридорам, комнатам, вкатывать в лифтовые кабины. Расстояние от пола до верхней кромки ручки – 900 мм и соответствует требованиям ГОСТ на данный вид изделия. Расстояние между полками (550 мм) и высота ограждения рабочей поверхности полок (120 мм) подобраны таким образом, чтобы обеспечить

безопасность и удобство при пользовании тележкой.

Мешок из синтетической ткани легко снимается и обрабатывается.

Тележка снабжена колесами Ø100 мм, обеспечивающими высокую маневренность и подвижность при эксплуатации



#### Габаритные размеры (мм)

Длина – 1230  
Ширина – 440  
Высота – 900

#### Комплект поставки

##### Основные детали


1. Опора-ручка – 1 шт.
2. Опора для мешка – 1 шт.
3. Сетка-корыто – 2 шт.
4. Колесо – 4 шт.

##### Крепежные изделия

5. Винт мебельный М6х30 с шестигр угл. – 8 шт.
6. Втулка М6х15 – 8 шт.

В комплект поставки входит ключ шестигранный № 5.

Изделие комплектуется съемным мешком из синтетической ткани 7.

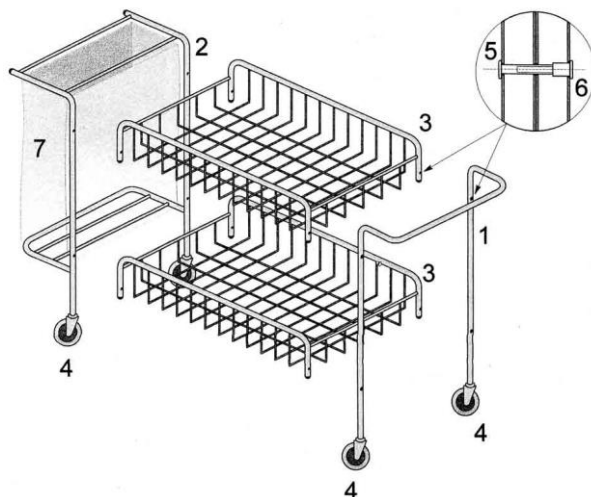

#### Инструкция по сборке изделия (см. рисунок)

1. Освободить все детали изделия от упаковки.

2. Вставить в отверстия на сетках-корытах винты М6х30 мебельные 5.
3. Вставить в отверстия на опорах гайки М6 мебельные 6.
4. Соединить все основные детали изделия при помощи ключа шестигранный № 5.
5. В опоры тележки вкрутить колеса 4.
6. На опоре для мешка 2 закрепить при помощи липкой ленты мешок для белья 7.

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными поверхностями

1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", 192174, Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б  
тел.: (812) 362-42-79  
web: [www.zavodmebel.ru](http://www.zavodmebel.ru)  
E-mail: [info@zavodmebel.ru](mailto:info@zavodmebel.ru)